


Kort brugsvejledning



1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Væskens overflade skal være mellem de to linjer på kuvetten. Berør ikke de klare, flade overflader på kuvettens nederste del.

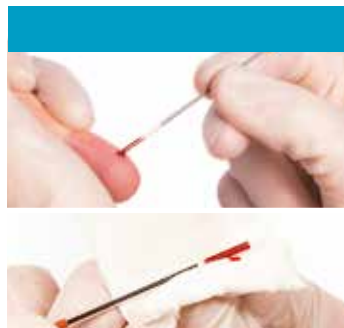

2 Fyld kapillærrøret med prøvematerialet (10 µl) op til den hvide stopklods. Kontroller, at der ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tør eventuelt overskydende prøvemateriale af kapillærrørets yderside.



3 Anbring prøven (10 µl) i bufferopløsningen i kuvetten, og tilsæt prøven ved at trykke stemplet ned. Kontroller, at kapillærrøret er helt tomt.



4 Luk kuvetten helt tæt med et wrCRP reagenslåg. Tryk ikke den inderste turkise del af låget ned. Når prøven er tilsat bufferen, skal testen køres inden for to timer.



5 Vælg Måling på displayet på QuikRead go instrumentet.



6 Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv. Displayet viser, hvordan målingen forløber.



7 Når målingen er gennemført, vises resultatet på displayet, og kuvetten vil automatisk komme op af aflæsningsbrønden. For QuikRead go wrCRP+Hb testen bliver Hb-resultatet vist nedenunder CRP-resultatet.

*Læs venligst
brugsvejledningen,
inden testen udføres*

Opbevaring af reagens



Æske

Opbevaring af uåbnet kit ved 2–25 °C:
Indtil kittets udløbsdato



Uåbnede kuvetter efter åbning af folieindpakningen

Opbevaring ved 2–8 °C:
6 måneder

Opbevaring ved 18–25 °C:
3 måneder



Reagenslåg

Uåbnet rør opbevaret ved 2–25 °C:

Indtil kittets udløbsdato

Opbevaring ved 2–25 °C efter åbning:
6 måneder



Åbnet kuvette

Prøven er stabil i bufferen i to timer.

Udfør testen indenfor for **to timer**, efter at du har åbnet kuvetten. Lad bufferen blive opvarmet til stuetemperatur, inden du udfører testen.



wrCRP Control (se skemaet nedenfor)

Uåbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:
Indtil udløbsdato

Åbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:
Op til to måneder



QuikRead go Hb 10 µl Control (se skemaet nedenfor)

Uåbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:
Indtil udløbsdatoen

Åbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:
Op til en måned



Orion Diagnostica Oy / Danmark
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark
Tlf. 8610 3020
www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com

8046-03DK, 11/2018

Produkt	Varenr.
QuikRead go wrCRP, 50 test » med kapillærrør (10 µl) og stempler	146521
QuikRead go wrCRP, 500 test	146522
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 test » med kapillærrør (10 µl) og stempler	146255
QuikRead go wrCRP Control 1 ml	153038
QuikRead go wrCRP Control High 1 ml	153039
Ultrasensitive CRP Control 1 ml	132698
QuikRead go Hb 10 µl Control 1 ml	153656
QuikRead go 10 µl kapillærrør, 50 stk	147851
QuikRead stempler, 50 stk	132655
QuikRead go instrument	135867
QuikRead workstation, 1 stk	136206

Se yderligere information på: www.quikread.com