

### Vejledning til Kvalitetskontrol CRP.

Kontrollen til CRP opbevares altid i køleskabet. Kontrollen skal stabiliseres i 30 min. ved stuetemperatur.

#### **Blandes grundigt.**

Holdbarhed CRP: Anbrudt flaske kan holde sig i 3.mdr i køleskab-kan bruges til 3 målinger (månederne skal være lige efter hinanden fx april, maj og juni).

CRP: Udtag 10 µL kontrolmateriale fra CRP kontrolflasken (**husk at vende flasken op og ned 10 gange forinden**) og placer kapillærrøret med kontrollen i kuvetten og tøm kapillærrøret ved at presse stemplet helt i bund. Luk kuvetten med et reagenslåg.

- På apparat vælg Kvalitetskontrol
- Indtast Operatør ID v. tryk på **Abc** feltet
- Indtast Kontrol ID v. tryk på **Abc** feltet-det er lot.nummeret, der skal indtastes: fx 1853377
- Isæt kuvetten-apparatet aflæser strekkoden vent et øjeblik
- Målingstype – vælg **CRP**
- Resultatet vurderes ud fra acceptniveau, som står på flasken.
- Tryk afslut
- Fjern kuvetten

Hvis kontrollen falder udenfor acceptniveauet køres en ny og falder den ligeledes udenfor, må apparatet ikke benyttes.

Teamet kontaktes efter 31.12.2019 kontaktes [Oriondiagnostica.dk](http://Oriondiagnostica.dk)